



## Sensor einführen


1

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Sensorpflaster und kleben Sie die Sensoreinheit auf die Haut.




2

Um den Sensor einzuführen drücken Sie die Taste <...> bis Sie ein Klicken hören.

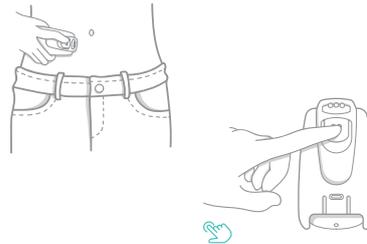

3

Drücken Sie die Taste <...> und heben Sie den Applikator von der Sensoreinheit ab.

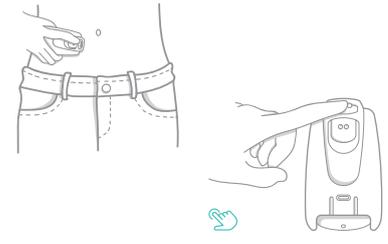


## / Sensor und Transmitter entfernen (nach 14 Tagen)

1


Entfernen Sie vorsichtig das Pflaster.

Von diesem Ende aus abziehen

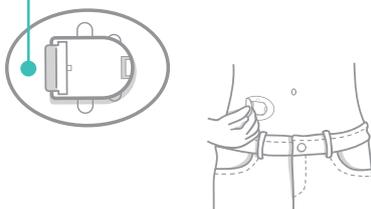


2

Falten Sie die Seiten des Pflasters zusammen & entfernen Sie den Transmitter.

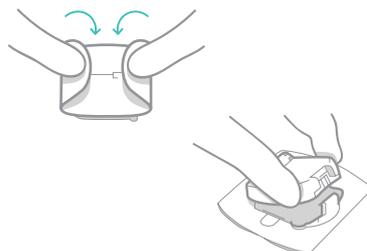

3

Laden Sie den Transmitter auf & entsorgen Sie den Sensor gemäß den örtlichen Bestimmungen.

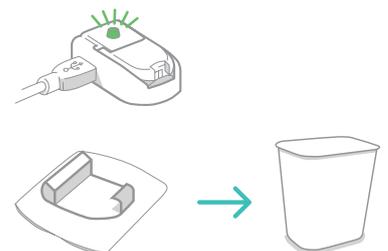

### ⚠ ACHTUNG

Entsorgen Sie nicht den Transmitter. Ihr Transmitter hat eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren.

Bitte beachten Sie die detaillierten Anweisungen in der GlucoMen® Day CGM Bedienungsanleitung  
© 2020 A. MENARINI Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen & Video-Anleitungen finden Sie unter [www.glucomenday.de](http://www.glucomenday.de)

A. MENARINI Diagnostics. Division der BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125 | 12489 Berlin | Tel.: 0800-45826636 | E-Mail: [glucomenday@berlin-chemie.de](mailto:glucomenday@berlin-chemie.de)